


# NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU ZNAČKY MAMAVIS®

## VÍCEÚČELOVÝ ZÁBAL PRO DĚTI NA HRUDNÍK, BŘÍŠKO A KYČLE

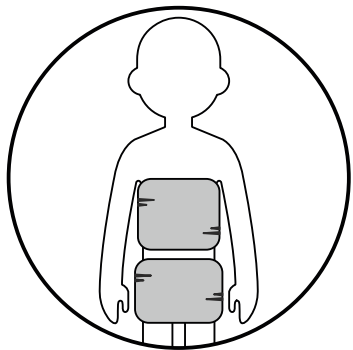

### K ČEMU JE ZÁBAL URČEN?

- Pomáhá při nachlazení, rýmě a kašli
- Snižuje horečku (nad 39 °C)
- Tlumí dráždivý suchý kašel
- Usnadňuje léčbu zánětu průdušek a dýchacích cest
- Účinně řeší dětské koliky
- Tlumí zánět či bolest kyčelního kloubu
- Pomáhá při ledvinové kolice či bolestech ledvin
- Urychluje hojení poúrazových a pooperačních stavů
- Tlumí bolest zad
- Podporuje léčbu zánětu močových cest

### Před použitím výrobku čtěte pozorně tento příbalový leták.

Inspirovali jsme se **Priessnitzovým zábalem** - tradicí ověřený a osvědčený přírodní postup, který používaly již naše babičky od dob jeho objevení Vincencem Priessnitzem (1799–1851), zakladatelem tzv. hydroterapie. Tato prověřená procedura vede ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím se zrychlují hojivé procesy v těle.

**Při nachlazení, rýmě, kašli, zánětu průdušek a dýchacích cest, zánětu či bolestech kyčelního kloubu, snižování horečky, či bolestech zad použijte zábal jako Priessnitzův obklad. (doporučován dětskými pediatry)**

1. Vyjměte vnitřní díl zábalového pásu a namočte jej do studené vody, poté vyždímejte (teplotu vody je důležité zvolit podle stavu pacienta - u dětí volíme méně studenou vodu cca 22 °C).
2. Namočený díl vraťte zpět do zábalového pásu podvlečením pod pásky.
3. Takto připravený zábal upevněte kolem potřebného místa (hrudník, kyčle, záda) pomocí suchého zipu.

**Při kolice bříška, ledvinové kolice, bolestech ledvin, zánětu močového měchýře, či bolestech zad použijte zábal formou suchého teplého obkladu v kombinaci s našimi BIO pohankovými, či třešňovými polštářky. Polštářky je možné zakoupit u daných prodejců či na našem e-shopu [www.mamavis.cz](http://www.mamavis.cz).**

1. Vnitřní vyjímatelnou část zábalu ponechte v tomto případě stranou.
2. Nahřejte pohankový či třešňový polštářek na co nejvyšší teplotu, která bude pro Vaše tělo snesitelná. Nahřátí proveďte v mikrovlnné troubě viz. příbalový leták pro zábalové polštářky Mamavis, nebo v klasické troubě, žehličkou, či jen na topení.
3. Nahřáté polštářky vložte do kapes všitých uvnitř zábalu.
4. Takto připravený zábal ovíňte v místě potíží, upevněte pomocí suchého zipu a dopřejte si teplý zábal tak dlouho, jak jen to bude příjemné.

**Zábal aplikujte vždy přímo na pokožku, přičemž dbejte těsného přilnutí.**

**Délka použití zábalu:** Zábal nechte působit 20–60 minut, opakujte do odeznění potíží, případně se poradte se svým lékařem. V případě malých dětí je třeba se o aplikaci studeného obkladu nejprve poradit s dětským lékařem.

---

Nenechte nic náhodě a o použití zábalového pásu Mamavis® se případně poradte s Vaším lékařem. Prosíme, dodržujte pokyny v příbalovém letáku.

**Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu [www.mamavis.cz](http://www.mamavis.cz) včetně instruktážních videí.**

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu [www.mamavis.cz](http://www.mamavis.cz) včetně instruktážních videí.

Ti, kteří znají léčebný účinek přírodních léčiv jako jsou byliny apod., mohou namáčet vyjímatelný obklad v bylinné lázni, případně potíř bylinnými mastmi, tvarohem apod. Tato aplikace je doporučena pouze zkušeným a znalým správného postupu.

**NÁVOD K ÚDRŽBĚ A OŠETŘENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:**

- Zábál je možné prát normálně v pračce při 40 °C a nechat volně uschnout (při sušení nenatahovat).
- Na materiálu nešetříme, proto by měl vydržet 3-5 let podle toho, jak často se bude zábál používat.

**PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ MAMAVIS® DBEJTE TĚCHTO ZÁSAD:**

- Ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost.
- Při praní ponechte suché zipy na výrobku zapnuté, udržujte je nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci.
- Teplota praní nesmí překročit 40 °C.
- Výrobek chraňte před stykem s ostrými předměty.
- Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku, či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace.

**Upozornění:**

Přírodní zábál se nesmí přikládat na místa infikovaná záněty, špatně se hojící rány, nebo kožní nemoci (ekzém aj.).

**Dodržování výše uvedených zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.**

**Naše výrobky mají atesty pro děti mladší 3 let.** Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

**SLOŽENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:**

- Vnější vrstva: 100 % bavlna
- Jádro: 50 % polyester, 25 % bavlna, 25 % polyuretan
- Vnitřní vrstva: 100 % bavlna
- Upínání: suchý zip
- Součástí většiny zábalů je vnitřní vyjímateľný díl ze 100% bavlny.

**Naše víceúčelové zábaly pomáhají při léčbě, rehabilitaci a relaxaci:**

- Vrchní vrstva tvoří pás ze 100% bavlny a protialergického rouna.
- Střední vrstva je nepropustná část pásu umístěna mezi vrchní a spodní vrstvou. Zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.
- Spodní vrstva je tvořena odnímatelnou vložkou z tenkého savého materiálu.