


# NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU ZNAČKY MAMAVIS®

## VÍCEÚČELOVÁ ZÁBALOVÁ ČELENKA NA HLAVU A NOSNÍ DUTINY

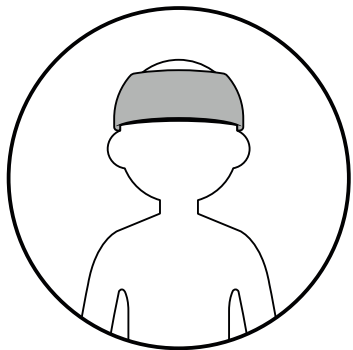

---

### K ČEMU JE ZÁBAL URČEN?

- Tiší bolesti hlavy včetně migrén
  - Snižuje záněty dutin v oblasti čela
- 

### Před použitím výrobku čtěte pozorně tento příbalový leták.

Inspirovali jsme se **Priessnitzovým zábalem** – tradicí ověřený a osvědčený přírodní postup, který používaly již naše babičky od dob objevení Vincenzem Priessnitzem (1799-1851), zakladatelem tzv. hydroterapie. Tato prověřená procedura vede ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím se zrychlují hojivé procesy v těle.

### Pokud máte bolest hlavy, nebo zánět dutin, použijte zábal jako Priessnitzův obklad.

1. Vyjměte vnitřní díl zábalové pásy a namočte jej do studené vody (teplotu vody je důležité zvolit podle stavu pacienta – pokud je člověk velmi oslabený, nebo vyhublý, zvolte méně studenou vodu, cca 22 °C)
2. Namočený díl podvlékněte pod pásy zábalového pásu.
3. Následně navlekněte na hlavu pomocí gumičky.

Místo mokrého zábalu lze využít také polštářky z třešňových pecek nebo pohankových slupek, které necháte chladit v lednici.

---

Nenechte nic náhodě a o použití zábalového pásu Mamavis® se případně poradte s Vaším lékařem.  
Prosíme, dodržujte pokyny v příbalovém letáku.

### Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu [www.mamavis.cz](http://www.mamavis.cz) včetně instruktážních videí.

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu [www.mamavis.cz](http://www.mamavis.cz) včetně instruktážních videí.

Ti, kteří znají léčebný účinek přírodních léčiv jako jsou byliny apod., mohou namáčet výjimatelný obklad v bylinné lázni, případně potříť bylinnými mastmi, tvarohem apod.  
Tato aplikace je doporučena pouze zkušeným a znalým správného postupu.

**NÁVOD K ÚDRŽBĚ A OŠETŘENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:**

- Zábál je možné prát normálně v pračce při 40 °C a nechat volně uschnout (při sušení nenatahovat).
- Na materiálu nešetříme, proto by měl vydržet 3-5 let podle toho, jak často se bude zábál používat.

**PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ MAMAVIS® DBEJTE TĚCHTO ZÁSAD:**

- Ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost.
- Při praní ponechejte suché zipy na výrobku zapnuté, udržujte je nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci.
- Teplota praní nesmí překročit 40 °C.
- Výrobek chraňte před stykem s ostrými předměty.
- Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku, či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace.

**Upozornění:**

Přírodní zábál se nesmí přikládat na místa infikovaná záněty, špatně se hojící rány, nebo kožní nemoci (ekzém aj.).

**Dodržování výše uvedených zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.**

**Naše výrobky mají atesty pro děti mladší 3 let.** Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

**SLOŽENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:**

- Vnější vrstva: 100 % bavlna
- Jádro: 50 % polyester, 25 % bavlna, 25 % polyuretan
- Vnitřní vrstva: 100 % bavlna
- Upínání: gumička
- Součástí většiny zábalů je vnitřní vyjímatelný díl ze 100% bavlny.

**Naše víceúčelové zábaly pomáhají při jsou určeny zejména k léčebným, rehabilitačním a relaxačním účelům. Vyznačují se tím, že se skládají ze tří vrstev:**

- Vrchní vrstva tvoří pás ze 100% bavlny a protialergického rouna.
- Střední vrstva je nepropustná část pásu umístěna mezi vrchní a spodní vrstvou. Zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.
- Spodní vrstva je tvořena odnímatelnou vložkou z tenkého savého materiálu.