


# NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU ZNAČKY MAMAVIS® VÍCEÚČELOVÝ ZÁBAL PRO DOSPĚLÉ NA HRUDNÍK, BŘICHO, ZÁDA A KYČLE

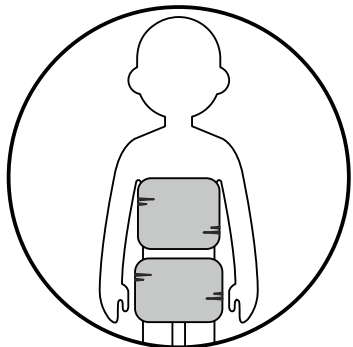

## K ČEMU JE ZÁBAL URČEN?

- Pomáhá při nachlazení, rýmě a kašli
- Tlumí dráždivý suchý kašel
- Uspadňuje léčbu zánětu průdušek a dýchacích cest
- Pomáhá při zánětu prsu při kojení a podporuje laktaci
- Tlumí zánět či bolest kyčelního kloubu
- Pomáhá při ledvinové kolice či bolestech ledvin
- Urychluje hojení poúrazových a pooperačních stavů
- Ulevuje při menstruačních bolestech
- Tlumí bolest zad
- Podporuje léčbu zánětu močového měchýře

## Před použitím výrobku čtěte pozorně tento příbalový leták.

Inspirovali jsme se **Priessnitzovým zábalom** - tradicí ověřený a osvědčený přírodní postup, který používaly již naše babičky od dob jeho objevení Vincencem Priessnitzem (1799–1851), zakladatelem tzv. hydroterapie. Tato prověřená procedura vede ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím se zrychlují hojivé procesy v těle.

### **Při nachlazení, rýmě, kašli, zánětu průdušek a dýchacích cest, zánětu prsu při kojení, zánětu či bolestech kyčelního kloubu, nebo bolestech zad použijte zábal jako Priessnitzův obklad.**

1. Vyjměte vnitřní díl zábalového pásu a namočte jej do studené vody, poté vyždímejte (teplotu vody je důležité zvolit podle stavu pacienta - pokud je člověk velmi oslabený, nebo vyhublý, zvolte méně studenou vodu).
2. Namočte díl vráťte zpět do zábalového pásu podvlečením pod pásky.
3. Takto připravený zábal upevněte kolem potřebného místa (hrudník, kyčle, záda, břicho) pomocí suchého zipu.

### **Při ledvinové kolice, bolestech ledvin, zánětu močového měchýře, bolestech zad, menstruačních bolestech či při podpoře laktace použijte zábal formou suchého teplého obkladu v kombinaci s našimi BIO pohankovými, či třešňovými polštářky. Polštářky je možné zakoupit u daných prodejců či na našem e-shopu [www.mamavis.cz](http://www.mamavis.cz).**

1. Vnitřní vyjímatelnou část zábalu ponechte v tomto případě stranou.
2. Nahřejte 2 ks pohankových či třešňových polštářků na co nejvyšší teplotu, která bude pro Vaše tělo snesitelná. Nahřátí proveďte v mikrovlnné troubě viz. příbalový leták pro zábalové polštářky Mamavis, nebo v klasické troubě, žehličkou či jen na topení.
3. Nahřáté polštářky vložte do kapes všitých uvnitř zábalu.
4. Takto připravený zábal ovíňte v místě potíží, upevněte pomocí suchého zipu a dopřejte si teplý zábal tak dlouho, jak jen to bude příjemné.

---

Nenechte nic náhodě a o použití zábalového pásu Mamavis® se případně poradte s Vaším lékařem.  
Prosíme, dodržujte pokyny v příbalovém letáku.

## **Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu [www.mamavis.cz](http://www.mamavis.cz) včetně instruktážních videí.**

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu [www.mamavis.cz](http://www.mamavis.cz) včetně instruktážních videí.

Ti, kteří znají léčebný účinek přírodních léčiv jako jsou byliny apod., mohou namáčet vyjímatelný obklad v bylinné lázni, případně potířt bylinnými mastmi, tvarohem apod.  
Tato aplikace je doporučena pouze zkušeným a znalým správného postupu.

**NÁVOD K ÚDRŽBĚ A OŠETŘENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:**

- Zábál je možné prát normálně v pračce při 40 °C a nechat volně uschnout (při sušení nenatahovat).
- Na materiálu nešetříme, proto by měl vydržet 3-5 let podle toho, jak často se bude zábál používat.

**PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ MAMAVIS® DBEJTE TĚCHTO ZÁSAD:**

- Ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost.
- Při praní ponechejte suché zipy na výrobku zapnuté, udržujte je nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci.
- Teplota praní nesmí překročit 40 °C.
- Výrobek chraňte před stykem s ostrými předměty.
- Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku, či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace.

**Upozornění:**

Přírodní zábál se nesmí přikládat na místa infikovaná záněty, špatně se hojící rány, nebo kožní nemoci (ekzém aj.).

**Dodržování výše uvedených zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.**

**Naše výrobky mají atesty pro děti mladší 3 let.** Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

**SLOŽENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:**

- Vnější vrstva: 100 % bavlna
- Jádro: 50 % polyester, 25 % bavlna, 25 % polyuretan
- Vnitřní vrstva: 100 % bavlna
- Upínání: suchý zip
- Součástí většiny zábalů je vnitřní vyjímateľný díl ze 100% bavlny.

**Naše víceúčelové zábaly pomáhají při léčbě, rehabilitaci a relaxaci:**

- Vrchní vrstva tvoří pás ze 100% bavlny a protialergického rouna.
- Střední vrstva je nepropustná část pásu umístěna mezi vrchní a spodní vrstvou. Zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.
- Spodní vrstva je tvořena odnímatelnou vložkou z tenkého savého materiálu.