


# NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU ZNAČKY MAMAVIS® ZÁPĚSTNÍK

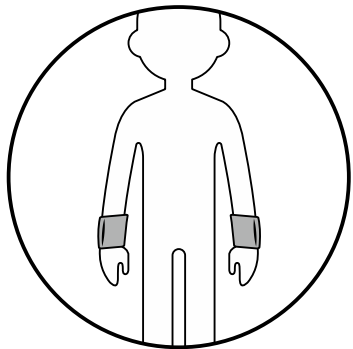

---

## K ČEMU JE ZÁBAL URČEN?

- Pomáhá od zánětu šlach zápěstí
  - Tlumí syndrom karpálního tunelu
  - Urychluje hojení poúrazových a pooperačních stavů
  - Je účinný při revmatických potížích
- 

## Před použitím výrobku čtěte pozorně tento příbalový leták.

Inspirovali jsme se **Priessnitzovým zábalem** – tradicí ověřeným a osvědčeným přírodním postupem, který používaly již naše babičky od dob objevení Vincenzem Priessnitzem (1. pol. 19. století), zakladatelem tzv. hydroterapie. Tato prověřená procedura vede ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím se zrychlují hojivé procesy v těle.

**Pokud trpíte syndromem karpálního tunelu, zánětem šlach zápěstí, nebo revmatickými potížemi, použijte zábal jako Priessnitzův obklad.**

1. Vyjměte vnitřní díl zábalového pásu a namočte jej do studené vody (teplotu vody je důležité zvolit podle stavu pacienta – pokud je člověk velmi oslabený, nebo vyhublý, zvolte méně studenou vodu)
2. Namočený díl navlékněte na ruku a upevněte nastavitelnou délkou suchého zipu.

---

Nenechte nic náhodě a o použití zábalového pásu Mamavis® se případně poradte s Vaším lékařem.  
Prosíme, dodržujte pokyny v příbalovém letáku.

**Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu [www.mamavis.cz](http://www.mamavis.cz) včetně instruktážních videí.**

Ti, kteří znají léčebný účinek přírodních léčiv jako jsou byliny apod., mohou namáčet výjimatelný obklad v bylinné lázni, případně potříť bylinnými mastmi, tvarohem apod. Tato aplikace je doporučena pouze zkušeným a znalým správného postupu.

## **NÁVOD K ÚDRŽBĚ A OŠETŘENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:**

- Zábál je možné prát normálně v pračce při 40 °C a nechat volně uschnout (při sušení nenatahovat).
- Na materiálu nešetříme, proto by měl vydržet 3-5 let podle toho, jak často se bude zábal používat.

## **PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ MAMAVIS® DBEJTE TĚCHTO ZÁSAD:**

- Ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost.
- Při praní ponechejte suché zipy na výrobku zapnuté, udržujte je nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci.
- Teplota praní nesmí překročit 40 °C.
- Výrobek chraňte před stykem s ostrými předměty.
- Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku, či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace.



### **Upozornění:**

Zábál se nesmí přikládat na místa infikovaná záněty, špatně se hojící rány, nebo projevy kožní nemoci (ekzém aj.).

**Dodržování výše uvedených zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.**

**Naše výrobky mají atesty pro děti mladší 3 let.** Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

## **SLOŽENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:**

- Vnější vrstva: 100 % bavlna
- Jádro: 50 % polyester, 25 % viskoza, 25 % polyuretan
- Vnitřní vrstva: 100 % bavlna
- Upínání: suchý zip
- Součástí většího zábalů je vnitřní vyjímatelný díl ze 100% bavlny.

**Naše víceúčelové zábalý jsou určeny zejména k léčebným, rehabilitačním a relaxačním účelům. Vyznačují se tím, že se skládají ze čtyř vrstev:**

- Vrchní vrstva tvoří pás ze 100% bavlny a protialergického rouna.
  - Střední vrstva je nepropustná a zpevňující část pásu umístěna mezi vrchní a spodní vrstvou. Zajistí neprůchodnost vody materiálem, zároveň udrží teplo a zábal zpevní.
  - Spodní vrstva je tvořena odnímatelnou vložkou z tenkého savého materiálu.
-