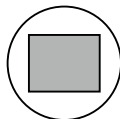
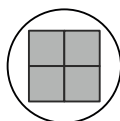
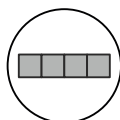


POLŠTÁŘEK Z BAVLNĚNÉ LÁTKY A POHANKOVÝCH SLUPEK**POLŠTÁŘEK VEL. 12 x 15 cm** (1 ks v balení)

Určený zejména do dětských zábalů Mamavis® na břicho, hrudník a kyčle.

**POLŠTÁŘKY VEL. 20 x 20 cm** (2 ks v balení)

Určený zejména do zábalů Mamavis® pro dospělé na hrudník, bedra, břicho a kyčle.

**POLŠTÁŘEK PODÉLNÝ VEL. 8 x 40 cm** (1 ks v balení)

Určený zejména do zábalů Mamavis® pro dospělé na krk.

Polštářky Mamavis® jsou doplňkem k našim zábalům Mamavis®, lze je však použít i samostatně a to dvěma způsoby:

TEPLÝ POLŠTÁŘEK - jemná masáž břicha při dětské kolice, bolavé ouško apod.

CHLADIVÝ POLŠTÁŘEK - bolest hlavy, štípance, spáleniny, pohmožděnin, otoky apod.

PŘI POUŽÍVÁNÍ DBEJTE TĚCHTO ZÁSAD:

- Pohankové polštářky Mamavis® nedoporučujeme prát.
- Při nahřívání dbejte pokynů uvedených v příbalovém letáku.
- Výrobek chraňte před stykem s ostrými předměty.
- Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku, či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamacce.

Důležitá je pro nás **KVALITA**, a proto jsou polštářky Mamavis® ručně šity v naší provozovně. Každý výrobek je tedy jedinečný. **K výrobě jsou použity pouze kvalitní materiály.**

Dodržování výše uvedených zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

SLOŽENÍ POLŠTÁŘKŮ MAMAVIS®:

- Vnější vrstva: 100 % bavlna
- Jádru: pohankové slupky

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU ZNAČKY MAMAVIS®

HŘEJIVÝ POLŠTÁŘEK

- Pohankové slupky jsou samozahřívací, ale můžete polštářek prohřát ještě na topení.
- Polštářek vložte do vybraného zábalu a upevněte pomocí suchého zipu, nebo jen přiložte na bolavé místo.

Pohankové slupky uvolňují příjemné aroma.

CHLADIVÝ POLŠTÁŘEK

- Z důvodu zachování čistoty vložte polštářek do igelitového obalu a umístěte do ledničky.
- Polštářek vložte do vybraného zábalu a upevněte pomocí suchého zipu, nebo jen volně přiložte na bolavé místo.

K ČEMU JE DOBRÉ POLŠTÁŘEK POUŽÍT?

U DĚTÍ

HŘEJIVÝ POLŠTÁŘEK

- na bolavé ouško
- tlumí bolest při onemocnění nosních dutin
- pomáhá při bolestech kloubů a končetin
- tlumí dětskou koliku

CHLADIVÝ POLŠTÁŘEK

- účinný pro zmírnění otoků a zhmoždění (např. vymknutý kotník)
- při bodnutí hmyzem
- k ochlazení bolavých kloubů či svalů
- na drobné popáleniny, které nevyžadují lékařskou pomoc
- zklidňuje podrážděné břicho u dětí při zvracení

U DOSPĚLÝCH

HŘEJIVÝ POLŠTÁŘEK

- tlumí bolesti zad
- tlumí menstruační bolesti
- podporuje laktaci
- zmírňuje bolesti krční páteře a šíje

CHLADIVÝ POLŠTÁŘEK

- tlumí záněty prsu při kojení
- zklidňuje podrážděné břicho při zvracení
- zmírňuje bolesti hlavy
- účinný pro zmírnění otoků a zhmoždění (např. vymknutý kotník)
- zklidňuje a zmírňuje kloubní či svalové záněty
- tiší drobné popáleniny, které nevyžadují lékařskou pomoc

PŘÍKLADY POUŽITÍ POLŠTÁŘKŮ VE SPOJENÍ SE ZÁBALY MAMAVIS

Hřejivý polštářek:

- **Na dětskou koliku** použijte pohankový polštářek (velikost 12 x 15 cm). Vložte jej do vnitřní kapsy dětského zábalu na břicho, hrudník a kyčle. Přiložte na břicho a upevněte pomocí suchého zipu (v tomto případě ramínka zábalu zůstávají volná).
- **Na bolest krční páteře** či šíje použijte podélný pohankový polštářek. Vložte jej do zábalu na krk podvlečením pod pásky. Přiložte na bolavé místo a upevněte pomocí suchého zipu.
- **Na menstruační bolesti** použijte pohankový polštářek (velikost 20 x 20 cm). Vložte jej do vnitřních kapes zábalu na hrudník, bedra a kyčle. Přiložte na bolavé místo a upevněte pomocí suchého zipu.

Chladivý polštářek:

- **Na bolest břicha spojené se zvracením** použijte zchlazený pohankový polštářek (velikost 12 x 15 cm). Vložte jej do vnitřní kapsy dětského zábalu na břicho, hrudník a kyčle. Přiložte na břicho a upevněte pomocí suchého zipu (v tomto případě ramínka zábalu zůstávají volná).

Příklady použití samostatného polštářku:

- Nahřátý, nebo studený polštářek přiložte na postižené místo. Můžete jím i jemně masírovat bolavou část těla.