


NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU ZNAČKY MAMAVIS® ZÁBALOVÉ RUKAVICE PRO DOSPĚLÉ

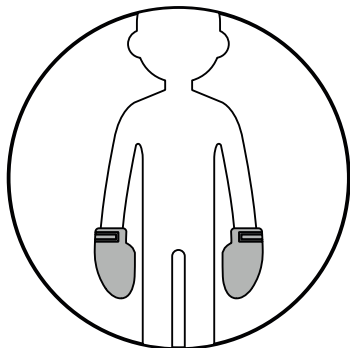

K ČEMU JE ZÁBAL URČEN?

- Účinně pomáhají při revmatických potížích a otocích končetin
- Využitelné při lázeňské a kosmetické proceduře
- Urychlují hojení poúrazových a pooperačních stavů

Před použitím výrobku čtěte pozorně tento příbalový leták.

Inspirovali jsme se **Priessnitzovým zábalem** - tradicí ověřený a osvědčený přírodní postup, který používaly již naše babičky od dob jeho objevení Vincenzem Priessnitzem (1799–1851), zakladatelem tzv. hydroterapie. Tato prověřená procedura vede ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím se zrychlují hojivé procesy v těle.

1. Vnitřní díl (obklad) zábalového pásu vyjměte a namočte do studené vody (teplotu vody je důležité zvolit podle stavu pacienta - u dětí a oslabených, či vyhublých pacientů volíme méně studenou vodu).
2. Vyzdímaný obklad navlékněte na ruku.
3. Poté navlékněte zábalovou rukavici a upevněte suchým zipem.

Zábal aplikujte vždy přímo na pokožku, přičemž dbejte těsného přilnutí.

Délka použití zábalu:

Zábal nechte působit 20–60 minut. Opakujte do odeznění potíží, případně se poradte se svým lékařem.

MAMAVIS doporučuje: Před aplikací obkladu je vhodné ruce namazat jakoukoliv léčivou či hojivou masťou, která léčbu podpoří. Pod zábalem masť lépe proniká do pokožky a lépe se vstřebává. **Tato aplikace je doporučena pouze zkušeným a znalým správného postupu.**

Zábal při lázeňské a kosmetické proceduře

Zábalové rukavice lze použít při lázeňských a kosmetických procedurách jako je např. parafínový, medový, či čokoládový zábal. **Tato aplikace je doporučena pouze zkušeným a znalým správného postupu.**

Nenechte nic náhodě a o použití zábalového pásu Mamavis® se případně poradte s Vaším lékařem.
Prosíme, dodržujte pokyny v příbalovém letáku.

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu www.mamavis.cz včetně instruktážních videí.

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu www.mamavis.cz včetně instruktážních videí.

Ti, kteří znají léčebný účinek přírodních léčiv jako jsou byliny apod., mohou namáčet výjimečný obklad v bylinné lázni, případně potříft bylinnými masťmi, tvarohem apod.
Tato aplikace je doporučena pouze zkušeným a znalým správného postupu.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A OŠETŘENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:

- Zábál je možné prát normálně v pračce při 40 °C a nechat volně uschnout (při sušení nenatahovat).
- Na materiálu nešetříme, proto by měl vydržet 3-5 let podle toho, jak často se bude zábál používat.

PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ MAMAVIS® DBEJTE TĚCHTO ZÁSAD:

- Ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost.
- Při praní ponechejte suché zipy na výrobku zapnuté, udržujte je nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci.
- Teplota praní nesmí překročit 40 °C.
- Výrobek chraňte před stykem s ostrými předměty.
- Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku, či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace.

**Upozornění:**

Přírodní zábál se nesmí přikládat na místa infikovaná záněty, špatně se hojící rány, nebo kožní nemoci (ekzém aj.).

Dodržování výše uvedených zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

Naše výrobky mají atesty pro děti mladší 3 let. Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

SLOŽENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:

- Vnější vrstva: 100 % bavlna
- Jádro: 50 % polyester, 25 % bavlna, 25 % polyuretan
- Vnitřní vrstva: 100 % bavlna
- Upínání: suchý zip
- Součástí většiny zábalů je vnitřní vyjímatelny díl ze 100% bavlny.

Naše víceúčelové zábaly pomáhají při léčbě, rehabilitaci a relaxaci:

- Vrchní vrstva tvoří pás ze 100% bavlny a protialergického rouna.
- Střední vrstva je nepropustná část pásu umístěna mezi vrchní a spodní vrstvou. Zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.
- Spodní vrstva je tvořena odnímatelnou vložkou z tenkého savého materiálu.