


NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU ZNAČKY MAMAVIS®

ZÁBALOVÁ ČEPICE

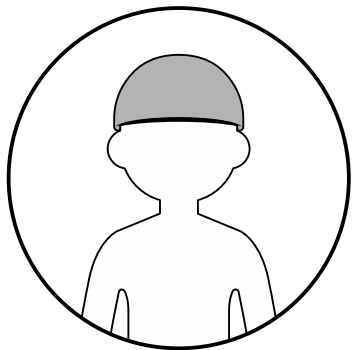

K ČEMU JE ZÁBAL URČEN?

- Při kosmetické a lázeňské proceduře
 - Zábaly na suché vlasy
 - Při bolestech hlavy
-

Před použitím výrobku čtěte pozorně tento příbalový leták.

Inspirovali jsme se **Priessnitzovým zábalem** – tradicí ověřeným a osvědčeným přírodním postupem, který používaly již naše babičky od dob objevení Vincenzem Priessnitzem (v 1. pol. 19. století), zakladatelem tzv. hydroterapie. Tato prověřená procedura vede ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím se zrychlují hojivé procesy v těle.

Při bolestech hlavy, použijte zábal jako Priessnitzův obklad.

1. Vyjměte vnitřní díl zábalové pásu a namočte jej do studené vody (teplotu vody je důležité zvolit podle stavu pacienta – pokud je člověk velmi oslabený, nebo vyhublý, zvolte méně studenou vodu, cca 22 °C)
2. Namočený díl vložte do zábalové čepice.
3. Následně navlekněte na hlavu pomocí nastavitelné gumičky a upevněte.

Při kosmetické a lázeňské proceduře lze místo studeného zábalu využít také odvary přírodních léčiv jako jsou byliny a masky. Namočte vyjimatelný díl v bylinné lázni, případně potřete bylinnými mastmi a aplikujte na postižené místo.

Nenechte nic náhodě a o použití zábalového pásu Mamavis® se případně poradte s Vaším lékařem.
Prosíme, dodržujte pokyny v příbalovém letáku.

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu www.mamavis.cz včetně instruktážních videí.

Ti, kteří znají léčebný účinek přírodních léčiv jako jsou byliny apod., mohou namáčet vyjimatelný obklad v bylinné lázni, případně potřít bylinnými mastmi, tvarohem apod. Tato aplikace je doporučena pouze zkušeným a znalým správného postupu.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A OŠETŘENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:

- Zábál je možné prát normálně v pračce při 40 °C a nechat volně uschnout (při sušení nenatahovat).
- Na materiálu nešetříme, proto by měl vydržet 3-5 let podle toho, jak často se bude zábál používat.

PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ MAMAVIS® DBEJTE TĚCHTO ZÁSAD:

- Ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost.
- Při praní ponechejte suché zipy na výrobku zapnuté, udržujte je nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci.
- Teplota praní nesmí překročit 40 °C.
- Výrobek chraňte před stykem s ostrými předměty.
- Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku, či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace.

**Upozornění:**

Zábál se nesmí přikládat na místa infikovaná záněty, špatně se hojící rány, nebo projevy kožní nemoci (ekzém aj.).

Dodržování výše uvedených zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

Naše výrobky mají atesty pro děti mladší 3 let. Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

SLOŽENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:

- Vnější vrstva: 100 % bavlna
- Jádro: 50 % polyester, 25 % bavlna, 25 % polyuretan
- Vnitřní vrstva: 100 % bavlna
- Upínání: gumička
- Součástí většiny zábalů je vnitřní vyjímatelný díl ze 100% bavlny.

Naše víceúčelové zábalý jsou určeny zejména k léčebným, rehabilitačním a relaxačním účelům. Vyznačují se tím, že se skládají ze čtyř vrstev:

- Vrchní vrstva tvoří pás ze 100% bavlny a protialergického rouna.
- Střední vrstva je nepropustná část pásu umístěna mezi vrchní a spodní vrstvou. Zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.
- Spodní vrstva je tvořena odnímatelnou vložkou z tenkého savého materiálu.